

Repel[®] Myco Clean

NAIL PATCH

**Επίθεμα υδρογέλης για νύχια με
μυκητιασική λοίμωξη**

► Αναστέλλει την ανάπτυξη του μύκητα
αλλάζοντας το μικροπεριβάλλον του νυχιού.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το επίθεμα υδρογέλης για τα νύχια **REPEL MYCOCLEAN NAIL PATCH** προσφέρει συνεχή ενυδατική δράση, βελτιώνει την όψη των αποχρωματισμένων και παραμορφωμένων νυχιών, λειαίνει απαλά την εξωτερική επιφάνεια των νυχιών και αλλάζει το μικροπεριβάλλον του νυχιού αποτρέποντας με τον τρόπο αυτόν την ανάπτυξη μυκητιασικών λοιμώξεων.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Εφαρμόζεται για 6 με 8 ώρες, συνήθως κατά τη διάρκεια του ύπνου, για περίοδο 3 έως 6 μηνών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αφαιρέστε τυχόν βερνίκι νυχιών πριν τη χρήση. Καθαρίστε και στεγνώστε την περιοχή στην οποία θα εφαρμοστεί το επίθεμα.
2. Κόψτε τη συσκευασία και αφαιρέστε από μέσα το επίθεμα.
3. Πλύνετε και στεγνώστε καλά τα χέρια καθώς τα έλαια ή η υγρασία της επιδερμίδας μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα προσκόλλησης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες εφαρμογής που εμφανίζονται παρακάτω.
5. Καθαρίστε τα νύχια μετά την αφαίρεση του επιθέματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αφαιρέστε τα προστατευτικά φιλμ ① και ② με αριθμητική σειρά.
2. Εφαρμόστε το επίθεμα υδρογέλης στο νύχι και αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί ③.
3. Καλύψτε όλες τις πλευρές του δακτύλου σφικτά.
4. Διπλώστε το εναπομείναν αυτοκόλλητο μέρος ώστε να καλύψετε το άκρο του δακτύλου.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εξωτερική χρήση μόνο.
- Για χρήση μόνο από/σε ενήλικες.
- Αποφύγετε την επαφή με μάτια, στόμα, βλεννογόνους, ανοιχτά τραύματα ή ερεθισμένο δέρμα. Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια σε κάποιο από τα επιθέματα στο παρελθόν.
- Μην το χρησιμοποιείτε αν έχετε αλλεργία σε κάποιο από τα συστατικά του επιθέματος.
- Διακόψτε τη χρήση εάν το δέρμα σας κοκκινίσει, πρηστεί ή παρουσιάσει φαγούρα κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια επιδεινωθεί ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, ζητήστε συμβουλή από γιατρό ή φαρμακοποιό.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

- Φυλάσσονται σε δροσερό και ξηρό μέρος και αεροστεγή συσκευασία, σε θερμοκρασία δωματίου.
- Φυλάσσονται μακριά από παιδιά ή νήπια.
- Επανασφραγίστε τη zip-lock συσκευασία ώστε να μην ξεραθούν τα εναπομείναντα επιθέματα.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: UREA, FUMARIC ACID, 1,3-BUTYLENE GLYCOL.

ΕΚΔΟΣΗ: 00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18.12.2019



0477



UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

14^ο χλμ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα, Τηλ.: + 30 210 80 72 512, www.uni-pharma.gr

Κατασκευαστής: Wooshin Labottach Co., Ltd. (Songdo BRC SMART Valley B-109, 914, 915, 1013, 1014, 1015, 1018, 1019) 30, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon City, Republic of Korea.

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος: Wooshin Lapache d.o.o Il Industrijska cesta 1J, 1290 Grosuplje, Slovenia